


CIRCAID

circaid®
undersleeve arm


Instructions for use. Gebrauchsanweisung.
Инструкция по использованию. Mode d'emploi. Instrucciones
de uso. Instruções de uso.

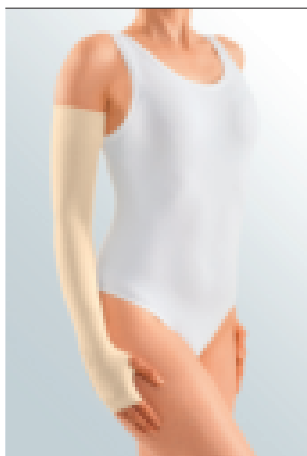

circaid undersleeve arm



circaid undersleeve arm silver

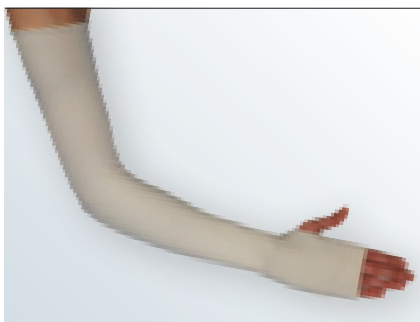

circaid undersleeve arm

circaid® undersleeve arm

Внутренний лайнер circaid undersleeve arm – трубчатое трикотажное изделие для верхней конечности с отверстием для большого пальца, предназначенное для использования под компрессионные биндажи circaid. Внутренний лайнер повышает комфорт и переносимость компрессионных биндажей.

Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К изделию не применяются специальные требования по утилизации.

**Состав материала
circaid undersleeve arm
внутренний лайнер на область
верхней конечности / circaid
undersleeve arm extra wide
внутренний лайнер на область
верхней конечности широкий**

94% Хлопок
6% Эластан



Не содержит латекс.

**circaid undersleeve arm silver
внутренний лайнер на область
верхней конечности с
серебром**

91% Полиэстер
5% Нейлон с покрытием,
содержащим серебро
4% Эластан



Не содержит латекс.

Рекомендации по стирке

- Машинная стирка, в теплой воде
- Не отбеливать
- Сушить в сушильной машине при невысокой температуре
- Не гладить
- Не применять химчистку

Примечания

Данное изделие не обеспечивает терапевтическую компрессию.

Использование внутреннего лайнера circaid undersleeve arm возможно для конечностей с окружностью до 21,25 дюйма / 54 см.

Использование внутреннего лайнера circaid undersleeve arm silver возможно для конечностей с окружностью до 23,5 дюйма / 60 см.

Использование внутреннего лайнера circaid undersleeve arm extra wide возможно для конечностей с окружностью до 31 дюйма / 80 см.